




# Radical-7<sup>®</sup> snabbguide



<b>På/av</b>	Tryck på  för att starta och stänga av enheten.
<b>Tysta larm</b>	Tryck på  för att tysta larm eller tryck på <b>silence (tystnad)</b> på skärmen.
<b>Lås upp skärm</b>	Tryck på  och håll den intryckt tills enheten indikerar att skärmen är olåst.
<b>Larmgränser</b>	Tryck på någon parameter för att öppna en viss parametermeny och tryck sedan på  för att gå in på larmmenyn, och ändra sedan larminställningarna med hjälp av skjutreglagen och rullningshjulet. Tryck på <input type="button" value="OK"/> för att bekräfta inställningen.
<b>Pulspip/larmvolym</b>	Tryck på  på huvudskärmen för att öppna ljudmenyn. Ändra volymen med skjutreglaget. Tryck på <input type="button" value="OK"/> för att bekräfta inställningen.
<b>Ändra parametervyer</b>	Tryck på parametern och håll den intryckt tills den blir nedtonad och skakar. Dra parametern till mitten eller nederdelen av skärmen. Om du vill öka parametrans teckensnittsstorlek minskar du antalet parametrar i det stora visningsområdet.
<b>Kurv-/parametergrafer</b>	Tryck på kurv- eller trendskärmen för att visa trendvalshjulet. Dra parameterhjulet uppåt eller nedåt för att visa ytterligare val. Centrera önskat val och peka på det för att visa det.
<b>Trendvy på helskärm</b>	Medan en trendvy visas trycker du på  för att visa en trend på helskärm.
<b>Trendvy på tvådelad skärm</b>	Medan enheten visar trend för en parameter på helskärm, trycker du på en annan parameter och håller den intryckt tills den blir nedtonad och skakar. Dra parametern till trendfönstret.
<b>Sensitivitetsläge</b>	Om du vill ändra sensorns sensitivitet trycker du på sensitivitetsinställningen i det övre vänstra hörnet på enheten. APOD – ger förbättrad <i>sensor av-detektion</i> . Rekommenderat startläge för patienter med god perfusion. Normal – ger bra total sensitivitet. Används om mätvärde inte kan erhållas eller om "låg perfusion" eller "låg signal-IQ" blinkar i APOD-läget. MAX – ger förbättrad sensitivitet för patienter med extremt låg perfusion. Används om mätvärde inte kan erhållas eller om "låg perfusion" eller "låg signal-IQ" blinkar i normalläget.

3694/LAB-81 65A 0114 E-7421A