

Ascend[®] näsmask

Patenterad AIR[®]gel[®] och utbytbar kudde

Touchless Spacebar

Unik design som ger stabilitet och sluter tätt utan hudkontakt

Utbytbar kudde

Du kan enkelt byta ut kudden utan att byta hela masken
Tillgängliga storlekar: S, M, L

Snabbfäste för huvudband

Gör det enkelt att sätta på och ta av masken

AIR[®]gel[®]


Maximal komfort
Minimal vikt
AIR[®]gel[®] som minskar tryck och hudirritation

360° roterbart knä

För optimal slangplacering och ökad rörlighet

Rörligt huvudbandsfäste

Följer patientens rörelser för att garantera optimal masktäthet och komfort

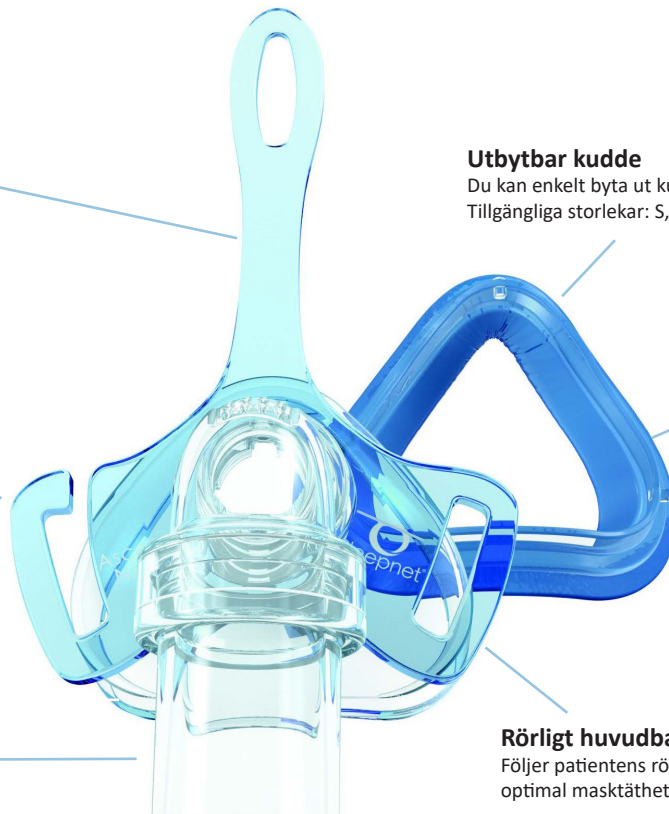

Enkelt att byta kudde

Ta isär

Fatta tag om nedre delen av kudden och lyft ut den

Sätt ihop

Placera det övre stiftet i skåran. Tryck på botten tills alla stift sitter fast



Ascend[®] näsmask

Användningstid
Mask: 6 mån
Huvudband: 6 mån
Kudde: 1 mån

Orderinformation

Artikelnummer	Beskrivning	Storlek på kudden	Dimensioner, cm Djup x Bredd x Höjd	Antal/ förp	MBA
50174	Masksystem och huvudband	Small, Medium, Large	N/A	1	1
50179	Masksystem med förmonterat huvudband	Small, Medium, Large	N/A	1	1
50157	Mask med förmonterat huvudband	Small	9,40 x 6,98 x 13,72	1	5
50158	Mask med förmonterat huvudband	Medium	9,65 x 7,49 x 13,72	1	5
50159	Mask med förmonterat huvudband	Large	10,08 x 8,38 x 13,72	1	5
50187	Mask utan förmonterat huvudband	Small	9,40 x 6,98 x 13,72	1	5
50188	Mask utan förmonterat huvudband	Medium	9,65 x 7,49 x 13,72	1	5
50189	Mask utan förmonterat huvudband	Large	10,08 x 8,38 x 13,72	1	5
50201	AIR [®] gel [®] kudde	Small	9,40 x 6,98 x 13,72	1	5
50202	AIR [®] gel [®] kudde	Medium	9,65 x 7,49 x 13,72	1	5
50203	AIR [®] gel [®] kudde	Large	10,08 x 8,38 x 13,72	1	5
55058	AFit huvudband	N/A	N/A	1	10

Utbytbar kudde

Kudden kan bytas utan att du behöver köpa ny mask



Materialinnehåll

Mask: Polykarbonat, polyuretanfilm, silikongel, termoplastisk polyuretan, UV-lim av medicinsk kvalitet

Huvudband: Nylon, spandex, polyuretanskum

AIR[®]gel[®] kudde: Polykarbonat, polyuretanfilm, silikongel, UV-lim av medicinsk kvalitet