

# Flow-Safe II EZ<sup>®</sup> CPAP system

Med inbyggd manometer\*, säkerhetsventil och nebulisator

## Produktinformation

- Integrerad tryckmanometer\* för kontinuerlig mätning av PEEP trycket, 0 – 25 cmH<sub>2</sub>O
- Integrerad läkemedelsnebulisator, en slang som driver både CPAP och nebulisator. Styrs med ett ON/OFF vred
- Säkerhetsventil som öppnas vid PEEP >25 cmH<sub>2</sub>O
- Inklusive huvudhätta och mask
- Kan kombineras med kapnometer (mätning av EtCO<sub>2</sub> och andningsfrekvens)
- Låg syrgaskonsumtion tack vare den nya venturi ventilen
- Alla produkterna är DEHP-fria
- Enpatientmodell



## Flödesinformation/PEEP

Flöde liter/min	CPAP/PEEP (cmH <sub>2</sub> O) Nebulisator av	CPAP/PEEP (cmH <sub>2</sub> O) Nebulisator på
6 liter/min	2,0-3,0	1,0-2,0
10 liter/min	6,0-7,0	2,0-3,0
12 liter/min	8,0-9,0	3,0-4,0
15 liter/min	11,0-12,0	4,0-5,0

CPAP/PEEP (cmH <sub>2</sub> O)	Flöde liter/min Nebulisator av	Flöde liter/min Nebulisator på
5,0	8-9 liter/min	15-16 liter/min
7,5	10-12 liter/min	19-20 liter/min
10,0	13-14 liter/min	24-25 liter/min
13,0	FLUSH	28-30 liter/min



## Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Förp
10-57318	Flow-Safe II EZ <sup>®</sup> / Deluxe mask CPAP, vuxen Small, med manometer*, övertrycksventil, mask i silikon, pannstöd, huvudhätta i nylon och MAX <sup>®</sup> nebulisator	5 st /Box
10-57319	Flow-Safe II EZ <sup>®</sup> / Deluxe mask CPAP, vuxen Medium, med manometer*, övertrycksventil, mask i silikon, pannstöd, huvudhätta i nylon och MAX <sup>®</sup> nebulisator	5 st /Box
10-57320	Flow-Safe II EZ <sup>®</sup> / Deluxe mask CPAP, barn Small, med manometer*, övertrycksventil, mask i silikon, pannstöd, huvudhätta i nylon och MAX <sup>®</sup> nebulisator	5 st /Box
10-57321	Flow-Safe II EZ <sup>®</sup> utan mask, med manometer*, övertrycksventil och MAX <sup>®</sup> nebulisator	5 st/Box

\* Manometerns exakthet är: +/- 3 cmH<sub>2</sub>O upp till 15 cmH<sub>2</sub>O och +/- 5 cmH<sub>2</sub>O över 15 cmH<sub>2</sub>O.