

BRUKSANVISNING VixOne™

VixOne är en läkemedelsnebulisator som är flödesberoende. Den drivs av en vanligt luft eller oxygen flödesmätare. Partikelstorleken från **VixOne** ligger mellan 2 – 5 μ micron för att läkemedlet skall deponeras på rätt ställe.

Partikel storlek μ		Förekomst
	100	Når ej andningsvägarna
5	100	Fastnar i näsan
2	5	Deponeras proximalt om alveoli
1	2	Kan nå ned i alveoli med 95-100% retention av partiklar ned 1 μ
0,25	1	Stabil minimal deponering i alveoli
0,25		Ökande deponering i alveoli

Bruksanvisning:

1. Ta ut produkten från förpackningen
2. Anslut oxygen/luft slangen till flödesmätaren (ej i kombination med befuktningssystem).
3. Deponera läkemedlet i nebulisatorn via toppen av hylsan eller genom att skruva av locket. Skruva tillbaka locket efter deponering av läkemedlet.
4. Är det produkt 0210. Koppla på T-stycke + munstycke och reservoar slang
5. Är det produkt 0310. Koppla nebulisatorn till maskens anslutningskoppling.
6. Anslut nu oxygen/luftslangen till nebulisatorns undersida.
7. Ställ flödet på **6-8l/minut**. Detta för att få exakt partikel storlek.

OBS: Koppla aldrig tillsammans VixOne eller någon annan flödesdriven nebulisator med befuktningssystem. Idag använder många AquaPak eller motsvarande som oxygenbefuktning. Det finns en övertryckventil som börjar att tjuta om trycket i flaskan blir för högt. Därför ska man ej använda den tillsammans med VixOne.

